

# Velox Top Af 1l - płyn do dezynfekcji powierzchni (neutral, grapefruit)



**Product price:**

**31,73 zł tax  
included**

**Product codes:**

Reference: -

EAN13: -

UPC: -

## **Product description:**

**Velox ® Top Af** - gotowy do użycia preparat do dezynfekcji powierzchni!

Preparat na bazie alkoholu zalecany do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego (fotele, łóżek zabiegowych, aparatury) , końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków stomatologicznych.

**Przy zakupie produktu dostaniesz Kartę Charakterystyki i Plan Higieny ! Próbkę MC 310 - do mycia urządzeń sanitarnych - Gratis!**

- **Szerokie spektrum mikrobójcze już w 30 sekund! - prątki, grzyby, wirusy, bakterie.**
- **Wyjątkowe właściwości myjące!**
- **Przyjemny, świeży, zapach grapefruta lub neutralny!**
- **Nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni ( nie zawiera aldehydu i fenolu - substancji rakotwórczych)!**

#### **Zastosowanie:**

- Preparat na bazie alkoholu zalecany do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego :foteli i łóżek zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej a także przedmiotów mających kontakt z żywnością. Zalecany również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków stomatologicznych.

#### **Spektrum mikrobójcze:**

#### **Spektrum**

**Normy wg EN 14885**

**Obciążenie organiczne**

**niskie**

**wysokie**

**Bakterie**(wtymMRSA)

EN1276

30sek.

1min.

EN13697

30sek.

1min.

EN13727

30sek.

**Drożdżaki**

EN1650

30sek.

1min.

EN13624

30sek.

**Prątkigruźlicy**(M.terrae)

EN14348

30sek.

1min.

**Wirusotoczkowe**(HBV,HCV,HIV,

Vaccinia,BVDV,Ebola)

RKI/DVV

30sek.

30sek.

**WirusRota**

EN14476

30sek.

**WirusAdeno**

EN14476

1min

**Sposób użycia:**

- Spryskać preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm dbając o całkowite jej pokrycie. Powierzchnia nie wymaga spłukania wodą, wysycha szybko nie pozostawiając smug. Nie stosować na

powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholi (np. szkło akrylowe). Wyrób przeznaczony do zastosowania przez profesjonalnego użytkownika.

### **Skład:**

- propan-2-ol, alkohol etylowy, aminy, QAV

### **Velox Top Af:**

- **Jest w formie spryskiwacza, gotowy do użycia bez rozcieńczania** - szybka, wygodna dezynfekcja .
- **Delikatny, świeży zapach eukaliptusa** - przyjemny zapach nie podrażnia dróg oddechowych, idealny do dezynfekcji w ciągu pracy.
- **Działa na bakterie, wirusy (HIV) , prątki gruźlicy** - szerokie spektrum działania od 30 sekund!
- **Nie zawiera aldehydu i fenolu** - bezpieczny dla wrażliwych materiałów nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni!

### **Product short description:**

Preparat na bazie alkoholu zalecany do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego.

### **Product features:**

### **Product attributes:**